


# AED(CU-ER1)の点検と表示ラベルについて

2011. 2. 22 改訂

## 日常点検

AEDは、毎日自動でセルフテストをしています。セルフテストの結果は、インジケータに表示されます。

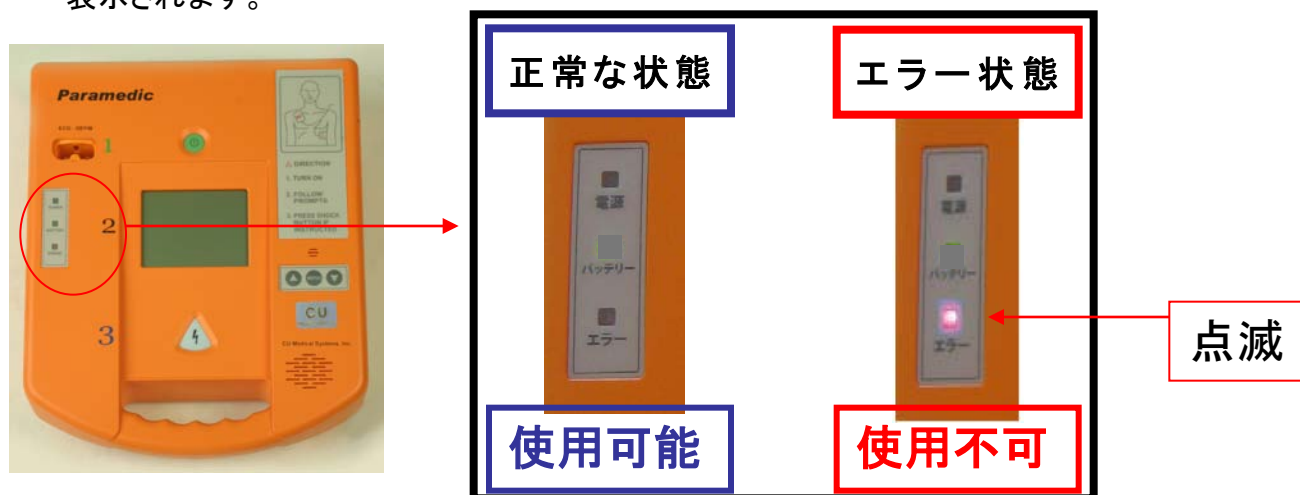

インジケータのエラーランプが点滅していないことを、毎日確認してください。数分間のうちにエラーランプが赤色に点滅し、アラーム音が鳴る場合は、使用不可能です、購入した販売店、又は大宇ジャパン(株)までご連絡ください。

連絡先: 大宇ジャパン株式会社  
医療機器品質保証チーム  
03-3224-7143

## 定期点検

- CU-ER1の定期点検の各項目について、定期点検結果を記入してください。定期点検表は、表示ラベルと一緒に又は収納ケースの外側に目に触れる所に保管してください。
- 点検の結果、異常が見つかりましたら、購入した販売店、又は大宇ジャパン(株)までご連絡ください。

不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、購入した販売店又は大宇ジャパン(株)に早急に連絡してください。

# 表示ラベルの取付と記入要領

● 電極パッドとバッテリーの交換時期を明記してください。


成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

交換時期欄に、交換時期(使用期限)を記入してください。

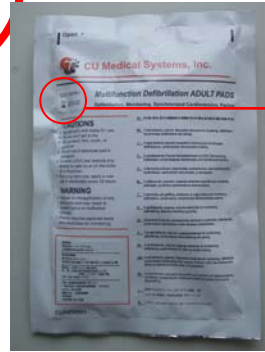

2010-2  
**2010年2月**  
が交換時期です。

電極パッドの交換期限が電極パッドのパッケージの裏に記載されています。使用期限は製造後30ヶ月です。

成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

バッテリーの交換時期は、CU-ER1設置後5年が目安です。5年から設置経過年月を差し引いて、交換時期を記入してください。

交換時期を記入した表示ラベルをCU-ER1が入ったキャリーバックに取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベルが収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。

成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期


◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。



表示ラベルをキャリーバックに取り付けた状態

# 電極パッド交換要領と交換後の対応

- 表示ラベルに書かれた電極パッドの交換時期が1ヶ月前に近づきましたら購入した販売店に連絡し、新しい電極パッドを購入してください。電極パッドには、変更シールが添付されています。

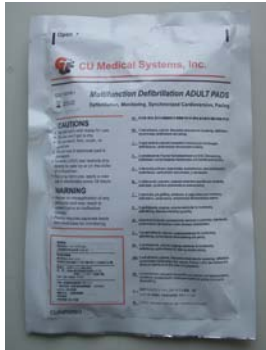

2011-5  
**2011年5月**  
が交換時期  
です。

2011 年 5 月

<変更シール>

電極パッドの交換期限が  
電極パッドのパッケージ  
の裏に記載されています。

成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

変更シールに交換時期を記入して、表示ラベルの該当箇所に貼り、キャリーバックにひもで取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベルが収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。

成人用電極パッド交換時期

小児用電極パッド交換時期

バッテリー交換時期

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。



表示ラベルを  
キャリーバックに  
取り付けた状態

## 🍊 バッテリー交換要領と交換後の対応

- 表示ラベルにはバッテリー交換時期が記入されていますが、交換時期は目安です。次のような状況になりましたらバッテリーは寿命です。購入した販売店に連絡し、交換の依頼をしてください。

(1)再充電後、一度も使用しないのに数日で Low Battery が表示された。

(2)CU-ER1設置後5年以上が経過した。

バッテリー交換が終わりCU-ER1がお手元に戻りましたら、本体に添付されている変更シールにバッテリー交換時期(交換後5年を加えた月日)を記入してください。

<変更シール>

2014 年 5 月

成人用電極パッド交換時期	年 月
小児用電極パッド交換時期	年 月
バッテリー交換時期	2009年 5月

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

成人用電極パッド交換時期	年 月
小児用電極パッド交換時期	年 月
バッテリー交換時期	2014年 5月

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。

変更シールに交換時期を記入して、表示ラベルの該当箇所に貼り、キャリーバックにひもで取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベルが収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。

成人用電極パッド交換時期	年 月
小児用電極パッド交換時期	年 月
バッテリー交換時期	年 月

◎バッテリーは、AEDの設置環境や使用状況などによって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。  
◎バッテリー交換は、販売店にご連絡ください。  
◎このAEDを使用するためには、3ヶ月毎の充電が必要です。



表示ラベルをキャリーバックに取り付けた状態